

## Caso clínico de estudio

### Parámetros recomendados para: Remodelación corporal

*Antes*



*Después de 5 sesiones*



Fotos cortesía de: Dr. Dinko Kaliterna, Dermatólogo, Zagreb, Croacia

Edad:	53 años
Tipo de piel:	II
IMC:	28 Kg/m <sup>2</sup>
Área de tratamiento:	Brazo derecho ; frontal
Nº de sesiones:	5
Intervalo entre sesiones:	1 semana
Eventos adversos:	Ninguno

#### Protocolo Fase 1: Módulo ULTRA

Cuadrícula de tratamiento:	15x10 cm
Nº de cuadrículas:	1
Tiempo:	32 minutos por cuadrícula
Ciclo:	Calor: 4 seg. / Frío: 16 seg.
Objetivo-Punto final:	Eritema

#### Protocolo Fase 1: Módulo RF

Módulo:	UniForm
Energía total por área:	70 kj
Potencia:	110-120 W
Objetivo-Punto final:	Eritema

*Antes del tratamiento:* Aplicar una capa homogénea de 1-2 mm de Vaselina (para ULS) o de aceite (para RF).

*Después del tratamiento:* Es muy importante que el paciente no gane peso y mantenga un balance de energía negativo.

El programa de Accent Ultra\* que presentamos en este documento ha sido proporcionado por el Dr. Dinko Kaliterna, dermatólogo croata (Zagreb).

Los parámetros de Accent Ultra proporcionados deben servir como una guía, sin sustituir a la observación clínica de la interacción de los ultrasonidos con el tejido y de los objetivos clínicos. Para más información, tiene a su disposición formación clínica. Pregúntenos.

\* Patente pendiente en EE.UU y en otros países.

**Alma** Lasers™  
Wellbeing Through Technology

