

Caso clínico de estudio

Parámetros recomendados para: Remodelación corporal

Antes



Después de 5 sesiones



Fotos cortesía de: Dr. Rafael Nunes, Cirujano Plástico, Slim Clinique Laser Center, Río de Janeiro, Brasil

Edad:	59 años
Tipo de piel:	IV
BMI:	24,9 Kg/m ²
Área de tratamiento:	Espalda
Nº de sesiones:	4
Intervalo entre sesiones:	1 semana
Eventos adversos:	Ninguno
Protocolo Fase 1: Módulo ULTRA	
Cuadrícula de tratamiento:	15x10 cm
Nº de cuadrículas:	2
Tiempo:	24 minutos por cuadrícula
Ciclo:	Calor: 5 seg. / Frío: 15 seg.
Objetivo-Punto final:	Eritema
Protocolo Fase 1: Módulo RF	
Módulo:	UniForm
Energía total por área:	88 kj
Potencia:	220 W
Objetivo-Punto final:	Eritema

Alma Lasers™
Wellbeing Through Technology



Antes del tratamiento: Aplicar una capa homogénea de 1-2 mm de Vaselina (para ULS) o de aceite (para RF).

Después del tratamiento: Es muy importante que el paciente no gane peso y mantenga un balance de energía negativo.

El programa de Accent Ultra* que presentamos en este documento ha sido proporcionado por el Dr. Rafael Nunes, cirujano plástico brasileño (Río de Janeiro).

Los parámetros de Accent Ultra proporcionados deben servir como una guía, sin sustituir a la observación clínica de la interacción de los ultrasonidos con el tejido y de los objetivos clínicos. Para más información, tiene a su disposición formación clínica. Pregúntenos.

* Patente pendiente en EE.UU y en otros países.